

Geurtesten

De Burghart Sniffin' Sticks worden gebruikt voor het testen van het olfactorische vermogen. Ze zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met KNO artsen en worden wereldwijd gebruikt. De geurtesten zijn gevalideerd en CE gecertificeerd. De testen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen:

Geuridentificatie

Voor geuridentificatie kunt u gebruik maken van de screeningtest met 12 geuren of de identificatietest met 16 geuren. De patiënt moet met behulp van multiplechoice kaarten de geuren identificeren.

Geurdiscriminatie

Bij de discriminatietest krijgt de patiënt telkens drie geurstiften aangeboden waarvan 1 geurstift een afwijkende geur heeft. Aan de patiënt de taak om deze afwijkende geur te bepalen.

Drempelwaardetest

Met de drempelwaarde test kunt u bepalen in welke mate een patiënt kan ruiken. Hierbij gaat de geurintensiteit steeds een stapje omlaag, de patiënt gaat telkens een concentratie stap omlaag, net zo lang totdat de patiënt de geur niet meer waarneemt.



Uitgebreide test

Voor een complete test hebben wij de uitgebreide test leverbaar die bestaat uit een combinatie van de identificatie-, discriminatie- en drempelwaardetest.

Geurtraining

Bij de diagnose van een reukstoornis hebben onderzoeken aangetoond dat de training van de reukzin een ondersteunende maatregel kan zijn in het herstelproces. Het is als het ware fysiotherapie voor de neus. De training kan uitgevoerd worden met 4 geurstiften of met 4 verschillende etherische oliën.

Algemene info

Iedere stift is voorzien van een houdbaarheidsdatum. U kunt de geurstiften voor een onbepert aantal mensen vóór deze datum gebruiken. De vervaldatum van de sticks hangt af van de test. De screening 12 test, identificatie test en discriminatie test hebben een houdbaarheid van ca. 1-1,5 jaar. Voor de drempelwaardetest is dit korter, ongeveer 8-10 maanden. De smaakstrips hebben doorgaans een houdbaarheid van ca. 1 jaar. Alle testen worden geleverd inclusief houders, handleiding en evaluatiemateriaal. Eventueel zijn de sets ook leverbaar als navulsets zonder toebehoren.

